

Wechsel der gebrauchten MELAdem 53 Patrone

MELAG-Geräte überprüfen die Leitfähigkeit des VE-Wassers und geben bei schlechter Qualität eine Warnmeldung aus. Gehen Sie wie folgt vor, um die Mischbettharzpatrone auszutauschen

1. Schließen Sie den Wasserhahn der Kaltwasserleitung.
2. Führen Sie vor dem Entfernen der Anschlusschläuche eine Druckentlastung durch. Halten Sie dazu ein kleines Gefäß unter das Ablassventil (grüne Schraube) am Anschlussbogen für VE-Wasser und drehen Sie das Ablassventil auf.
3. Warten Sie so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Ablassventil austritt.
4. Schließen Sie das Ablassventil wieder.
5. Schrauben Sie den Anschlussbogen des Kaltwasserzulaufschlauches und den Anschlussbogen vom VE-Wasser-Anschlussstutzen mit dem beiliegenden Maulschlüssel ab. Achten Sie dabei auf eventuell austretendes Restwasser aus den Schläuchen!
6. Stellen Sie die Mischbettharzpatrone umgedreht in eine kleine Wanne (Fassungsvermögen ca. 400 ml) und warten Sie, bis kein Wasser aus der Mischbettharzpatrone austritt.
7. Schrauben Sie die gelben Kappen fest auf die Anschlussstutzen der Kaltwasserleitung („Rohwasser EIN“) und dem Anschlussstutzen VE-Wasser („Reinwasser AUS“).
8. Verpacken Sie die leere Mischbettharzpatrone in der MELAG-mehrweg-Transportverpackung.

Anschliessen der neuen MELAdem 53 Patrone

1. Schliessen Sie den Kaltwasserschlauch bei „Rohwasser EIN“ sowie den Anschlussbogen VE-Wasser bei „Reinwasser AUS“ an. Achten Sie darauf, dass sie beim Anlegen der Anschlüsse die vorhandene Dichtung wieder einlegen.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit dem beiliegenden Maulschlüssel an.
3. Drehen Sie den Wasserhahn der Kaltwasserleitung auf.
4. Drehen Sie die Entlüftungsschraube (Metallschraube in der Mitte der Patrone) etwas auf und warten Sie bis Wasser austritt.
5. Sobald die ersten Tropfen Wasser aus der Entlüftungsschraube fließen, drehen Sie diese wieder zu.
6. Prüfen Sie abschließend alle Schlauchanschlüsse auf Dichtigkeit.

Bestellung für die Regeneration der gebrauchten MELAdem 53 Patrone:

info@satora.ch, auf www.satora-shop.ch oder telefonisch 052 355 18 18
Die verpackte Patrone wird danach von einem DPD-Kurier bei Ihnen abgeholt